

Model stopy do ćwiczeń manualnych



Przeznaczenie.

Model stopy zastępuje ludzką stopę z różnymi jej defektami.

Służy do praktycznych ćwiczeń zarówno na zajęciach szkolnych jak i w podologicznych ośrodkach szkoleniowych. Model jest również wykorzystywany w gabinetach podologicznych jako model demonstracyjny. Jest idealny do objaśnień pacjentom wszelkich wad na ich stopach.

Charakterystyka.

- Stopa ludzkiego kształtu wykonana jest z mocnego, twardego, a zarazem elastycznego tworzywa żelowo-woskowego, przypominającego w swej konsystencji mięśnie i naturalną tkankę skórą. Używając np. ostrza skalpela ma się wrażenie jakby ścinało się skórę stopy.
- Na modelu stopy widać m.in. Hallux Valgus, pięta Haglunda, deformację palców i przodostopia, wklęsłość stopy.
- Idealnie sprawdza się na zajęciach szkolnych i kursach podologicznych.
- Model jest gotowy do użycia od zaraz. Oznacza to, że po rozpakowaniu można go np. nakręcić na imadło, ustawić według potrzeb i ćwiczyć techniki skalpela, dłutowania, protetykę, albo zakładanie ortez, opatrunków i odciążań.



- Do modelu dołączony jest mały kawałek masy żelowo-woskowej Revo Gel Platte (4 x 4 cm), który pozwala na uzupełnienie pierwszych ubytków podczas ćwiczeń.
- Model stopy można mocować za pomocą specjalnego imadła do stolika, który opcjonalnie można kupić w naszym sklepie.
- Model stopy może być również eksponatem w gabinecie podologicznym lub ortopedycznym, na którym wyjaśnia się pacjentom ich dolegliwości i sposoby ich usuwania.

Typ dla techniki skalpela:

- Model stopy najlepiej nakręcić na imadło i ustawić według potrzeb.
- Rozpocząć naukę ścinania stopy w dowolnym miejscu na modelu.
- Ubytki uzupełnić masą żelowo-woskową Revo Gel. Wystarczy odciąć kawałek tej masy i trzymając np. pęsetą rozgrzać do momentu topnienia i przykleić do brakującej części stopy. Masa stygnie raczej wolno i po zaledwie 1 minucie można ją formować na modelu stopy.
- Można również nałożyć dowolną warstwę masy na model stopy tworząc imitację zgrubiałej skóry, modzela itd. Zgrzewając masę z modelem powstanie zgrubienie do usunięcia czyli do ćwiczeń.
- **Innym sposobem** na wykorzystanie modelu stopy do techniki skalpela, a także do techniki dłutowania jest zanurzenie go w ciepłej parafinie. Wystarczy kilka razy zanurzyć np. przodostopie albo piętę modelu w rozgrzanej parafinie by warstwa zrobiła się grubsza i przypominała skórę. Taką warstwę można ścinać ostrzem skalpela albo dłutem podologicznym ćwicząc wybraną technikę.



Typ dla techniki dłutowania:

- Model stopy trafia na imadło.
- Podobnie jak w pierwszym przypadku ubytki po dłutowaniu (wyżłobieniu dołka) można uzupełniać masą Revo Gel.
- Aby ograniczyć głębokie żłobienie w modelu stopy producent proponuje utwardzenie wyżłobionej dziury za pomocą cienkiej warstwy akrylu albo Nagelmasse. Po wyschnięciu jednej z tych mas zalewa się otwór ciekłą (rozgrzaną) masą Revo Gel. Pozwala to podczas kolejnych ćwiczeń dłutem na wycucie miejsca (twardej krawędzi), które nie powinno być dalej podrażnione.

Typ dla protetyki paznokci stóp:

W celu ćwiczeń technik protetycznych producent zaleca izolację palca zanim naklei się na niego specjalne masy akrylowe lub żelowe. Ułatwia to czyszczenie i zdejmowanie sztucznych paznokci z palców modelu stopy.

Typ dla ćwiczących zakładanie klamer ortonykcyjnych:

Po nałożeniu / przyklejeniu sztucznego paznokcia (najlepiej metoda Eckle i Greppmayr) można ćwiczyć zakładanie klamer ortonykcyjnych.

Typ do wykonywania ortoz indywidualnych:

Wystarczy dobrze wymieszać masy silikonowe RUCK® (w zależności od potrzeb) Strong (mocna), Soft (średnia) i Super-Soft (miękką) i uformować odpowiednie odciążenie na przodostopie czy między palce modelu stopy. Potem następuje obróbka mechaniczna mas silikonowych.

Producent:

ERKODENT zaświadcza, że model stopy wykonany jest z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia oraz że jest produktem bezpiecznym. Został wykonany i dopuszczony do obrotu zgodnie z dyrektywami i przepisami UE.

Przeciwwskazania do stosowania modelu stopy:

Model trzymać z daleka od małych dzieci.

Ćwiczenia na modelu stopy nie powinny wykonywać osoby chore / upośledzone ruchowo i psychicznie.

Należy używać zgodnie z powyższą instrukcją.