



1. Nałożyć maść Schrundensalbe nieco grubiej, najlepiej za pomocą szpatuły.



2. Pierwszą folię nośną (białą) odkleić.



3. Plaster okluzyjny ostrożnie nałożyć na piętę.



4. Drugą folię nośną (przezroczystą) odkleić. Plaster dobrze docisnąć.



5. Opatrunek okluzyjny jest gotowy. Maksymalny czas noszenia to 48 godzin.



6. Krawędzie można dodatkowo zabezpieczyć oklejając je plastrem z rolki RUCK Sensitive.