

PODOPHARM Sp. z o. o

Ul. Karola Olszewskiego 6 lok. -1.04

25-663 Kielce

www.podopharm.pl

Posiada certyfikat CE

**UŻYCIE W CELU INNYM NIŻ WYNIKAJĄCE Z NAZWY LUB PRZEZNACZENIA MOŻE USZKODZIĆ
NARZĘDZIE I STWARZA ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NARZĘDZI

Narzędzie jest sprzedawane jako niesterylne przed jego użyciem należy dokonać dezynfekcji oraz sterylizacji .

PIERWSZOKROTNE UŻYCIE:

Nowo zakupione narzędzie należy przed pierwszym użyciem :rozkonserwować, wyczyścić i poddać sterylizacji .W tym celu należy dokonać pierwszego mycia profesjonalnym detergentem w celu zmycia środka konserwującego narzędzie.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzi.

MYCIE I DEZYNFEKCJA:

Mycie oraz dezynfekcję można przeprowadzić metodą manualną lub za pomocą ultradźwięków przy użyciu środka myjąco – dezynfekującego. Zaleca się użycie środków odpowiednich do czyszczenia narzędzi medycznych metalowych wolnych od związków aldehydowych oraz o sprawdzonej skuteczności (znak CE),np.: GIGASEPT INSTRU AF firmy SCHULKE lub pokrewne.

PRZYGOTOWANIE DO STERYLIZACJI:

Po myciu a przed sterylizacją narzędzia takie jak kleszcze, igłotrzymacz należy w miejscu połączenia nasmarować olejem przeznaczonym do smarowania narzędzi medycznych.

Narzędzia do sterylizacji należy pakować w rękawy papierowo-foliowe lub torebki papierowo-foliowe.

STERYLIZACJA NARZĘDZI:

W walidowanym procesie sterylizacji.

METODY STERYLIZACJI:

W czasie procesu sterylizacji narzędzia nie mogą być poddane działaniu temperatury wyższej niż 200 st. C. Zaleca się sterylizację parową o parametrach procesu sterylizacji 134 st. C 7 minut.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.