


BLUE LIGHT
PROFESSIONAL




Instrukcja krok po kroku BLUE LIGHT professional Gel hard

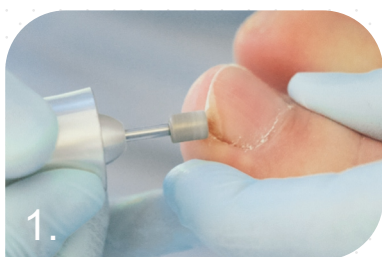


Przygotowanie

Wyównaj i wygładź płytkę paznokcia frezem diamentowym a następnie oczyść i odtłuść Cleanerem RUCK® NAGELKORREKTUR. Profesjonalny żel RUCK® NAIL CORRECTION BLUE LIGHT wyjmij z lodówki na 10 minut przed zabiegiem.

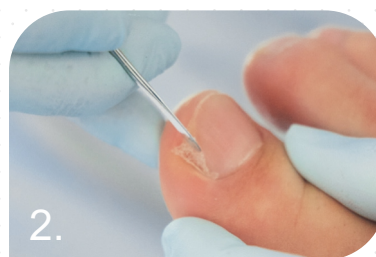

Tamponowanie wstępne

Zaaplikuj kroplę tynktury przedzabiegowej peclavus® PODomed Vorbehandlung do rowka wału paznokciowego i pozostaw na 5-8 minut, aby uzyskać optymalny rezultat. Ponownie oczyść wał paznokciowy i końcówkę paznokcia za pomocą np. dwustronnego instrumentu typu sonda, a następnie załóż tamponadę.

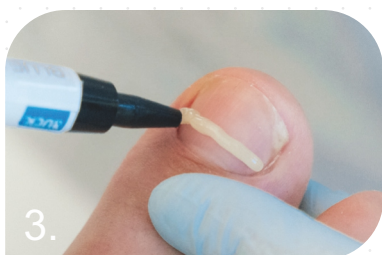

Nakładanie twardego żelu RUCK® Nagelkorrektur BLUE LIGHT professional Gel hard i modelowanie klamry.

Nałóż i uformuj twarde żel RUCK® NAGELKORREKTUR BLUE LIGHT professional na paznokciu używając do tego np. sondy. Masę należy modelować bez nacisku i spłaszczyć w kierunku wału paznokciowego. Upewnij się, aby wymodelowany żel nie był wyższy niż 2 mm, i żeby nie dotykał wału paznokciowego. Aby uzyskać lepszą przyczepność, nałóż podkład RUCK® NAGELKORREKTUR Primer najlepiej za pomocą wacika i poczekaj aż po chwili wyschnie.



Utwardzanie żelu RUCK® Nagelkorrektur BLUE LIGHT professional Gel hard

Po udanej aplikacji żel utwardza się przez 60 sekund za pomocą lampy LED RUCK® NAGELKORREKTUR BLUE LIGHT. Po procesie utwardzania powstaje warstwa dyspersyjna, którą należy usunąć. W tym celu polecamy RUCK® NAGELKORREKTUR Cleaner. WSKAZÓWKA: Po utwardzeniu paznokieć można unieść za pomocą sondy lub tamponady rozporowej. Zwiększa to napięcie modelowanej klamry.



Korekta nierówności

Nierówności klamry można skorygować frezem z twardego metalu. Należy pamiętać, że całkowita wysokość klamry pasywnej nie powinna przekraczać 2 mm.



Tamponowanie końcowe

Wymień tamponadę wstępną lub rozporową na nową tamponadę (Copoline). Zaaplikuj kroplę tynktury pozabiegowej peclavus® PODomed Nachbehandlung w celu uspokojenia okolicy zabiegu. Pozostaw na 5-8 minut, aby uzyskać najlepszy efekt. Wymodelowana klamra pasywna przesuwa się wraz ze wzrostem paznokcia. W zależności od przebiegu terapii aplikacja może być powtarzana.

RUCK®

hellmut-ruck.de
sklep.podologiczny.pl