

schülke -†



Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych

rotasept® płyn

Zalety

- mycie i dezynfekcja
- nie zawiera aldehydów
- szerokie spektrum działania
- możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej
- doskonała tolerancja materiałowa
- specjalna ochrona przed korozją

Właściwości produktu

rotasept® jest gotowym do użycia preparatem myjąco - dezynfekującym na bazie alkoholu i ługu potasowego przeznaczonym do dezynfekcji i czyszczenia wiertel, frezów, szlifierek diamentowych i innych obrotowych narzędzi precyzyjnych. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec adenowirusa, norowirusa i wirusa polio.

Wskazówki dotyczące stosowania

rotasept® nierozcieńczony nalać do pojemnika na frezy. Każde mikronarzędzie obrotowe należy włożyć natychmiast po użyciu do roztworu rotasept®, aby nie dopuścić do zaschnięcia zanieczyszczeń. Nie mieszać z innymi środkami. Po dezynfekcji narzędzi nie splukiwać wodą, co pozwoli zapobiec korozji. Wyjąć pęsetą na chusteczkę celulozową - do wyschnięcia. Trwałe zabrudzenia usunąć szczotką i powtórzyć cykl dezynfekcji. Należy wystrzegać się przedłużania czasu oddziaływania. Jeżeli wymagany jest proces sterylizacji, narzędzia należy opłukać i wysuszyć.

CE 0297



Dane produktu

100g preparatu rotasept® zawiera: 1,6 g wodorotlenku potasowego 10 g propan-2-olu, 0,1 g 2-etyloheksanolu. Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem nr 648/2004: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	13,7 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	nie określono
Temperatura zapłonu	36 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne

Nie należy stosować do tworzyw sztucznych wrażliwych na alkalia i alkohole, części aluminiowych oraz narzędzi, które wykonywane były przy użyciu klejów syntetycznych. W takich przypadkach polecamy zastosowanie preparatu gigasept® instru AF. Należy przestrzegać zasady przestrzegania czasu oddziaływania preparatu.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
ROTASEPT płyn 2L FL	5/Karton	104745

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com